


## CHESTAC-8900 保守点検表

施設名		設置場所(科名)		検印
長崎大学病院		生理機能検査室		
形式		御担当		
CHESTAC-8900(1号機)		川浪 様		
製造番号(S/N)	納入日	ソフトウェアバージョン	ロムバージョン	
890475	2014年12月22日	Ver 6.17N		
点検担当者	点検日	点検環境 室温/湿度	管理番号	
井上	2026年3月25日	25.1 °C / 45.9 %		
コンピュータ	型式	EPSON Endeavor AT993E		
ディスプレイ	型式	EIZO FlexScan S2133		
プリンター	型式	Canon LBP7200CN		
減圧弁	酸素(O2)	型式	田中製作所減圧弁JET-V110特型(O2)	
	2種混合(HeO2)	型式	田中製作所減圧弁JET-V110特型(HeO2)	
	4種混合(STD)	型式	田中製作所減圧弁JET-V110特型(STD)	
使用測定器	品名		管理番号	
	3L較正シリンジ		010-005-020	
	デジタルマルチテスター		010-005-010	

項目	規格			判定	処置
外観・機能	汚れ・傷	外装に汚れ・傷のないこと		合格	
	ラベル	剥がれていないこと		合格	
	接続部(各コネクタ)	各コネクタ部に破損がないこと		合格	
	接続部(各ケーブル・ホース)	ケーブル及びホースに破損がないこと		合格	
	接続部(ガスカプラー)	容易に着脱ができ漏れのないこと		合格	
	ハッチ部	ハッチが正常に開閉できること		合格	
	ハッチ部(紫外線ランプ)	紫外線ランプが正常に機能すること		合格	交換
	ハッチ部(ブロー)	異常音がなく正常作動のこと		合格	
	三方コック	無理なく開閉すること		合格	
	リモートスイッチ	正常に作動すること	スイッチ表記判読困難	合格	
安全性	昇降機	上下限まで正常に作動すること		合格	
	漏れ電流検査: 接地漏れ電流	正常状態: 0.5mA以下	0.03 mA	合格	
	(正常状態・単一故障状態)	単一故障状態=1mA以下	0.02 mA	合格	
	漏れ電流検査: 外装漏れ電流	正常状態: 0.1mA以下	0.02 mA	合格	
(正常状態・単一故障状態)	単一故障状態=0.5mA以下	0.01 mA	合格		
SVC精度検証		較正用3Lシリンジで、ベル位置がセンターの状態でのボリュームを測定し、誤差が±3%以内であること	3.00 L	合格	
FVC精度検証		較正用シリンジで、低フロー、中フロー、高フローの誤差が±3%以内であること	低 = 3.02 L 中 = 3.02 L 高 = 3.02 L	合格 合格 合格	
FRC精度検証		3LシリンジでFRCの精度検証を行い、FRC値が3.0±3%以内であること	DS = 10.18 L FRC = 2.99 L	合格 合格	
DLCO精度検証		DLCO'が±0.5以内であること IVC(B)が3.0L±3%以内であること	DLCO' = 0.02 IVC = 3.02 L	合格 合格	
CV精度検証		VCが3.0L±3%以内であること	VC = 3.05 L	合格	
ガスアナライザー動作		CO / He		合格	
温度検証		温度計と比較して±1℃以内であること	計器/本体(℃) 25.9/25.7	合格	
気圧検証		気圧計と比較して±25hPa以内であること	計器/本体(hPa) 1004.7/1003.6	合格	
コンピュータ	本体	WINDOWS7	正常に起動・終了すること	合格	
		時計	時計機能が正常に機能すること	合格	
		DVDドライブ	正常に作動すること	合格	
	キーボード		すべてのキーが作動すること	合格	
	プリンター		正常に作動すること	合格	

不具合内容及び対策

ガスリザーブバック(295)、サンプルバック(320A)、紫外線殺菌灯、ソーダライム部Oリングの交換。  
 ガラス管スポンジお渡し。マスター電磁弁O2チューブ部接触時に漏れあり。ブロー動作異音。COセンサー劣化。  
 ※マスター電磁弁O2、ブロー、COセンサーについては測定に影響が発生する可能性がある為、交換を推奨いたします。

総合判定及び備考

・測定に差し支えないが、処置が必要